

LM™ Extraction

LM

feel the
difference



Zahnextraktion mit Vertrauen

LMliftOut™


Luxationsinstrumente für atraumatische Extraktionen

Mithilfe der LM-LiftOut™ Instrumente kann die Zahnextraktion so atraumatisch wie möglich erfolgen. Das ist wesentlich für eine zügige Wundheilung, besonders dann, wenn anschließend ein Implantat gesetzt werden soll. Die dünne Spitze des Instruments wird am Parodontalspalt möglichst axial in Richtung der Zahnwurzel angesetzt. Durch die drehenden und schneidenden Luxationsbewegungen entlang der Wurzel hebt sich diese schonend aus der Alveole. LM-LiftOut™ sollte nicht wie ein Hebel eingesetzt werden.




Winkel und Größen

Gerade

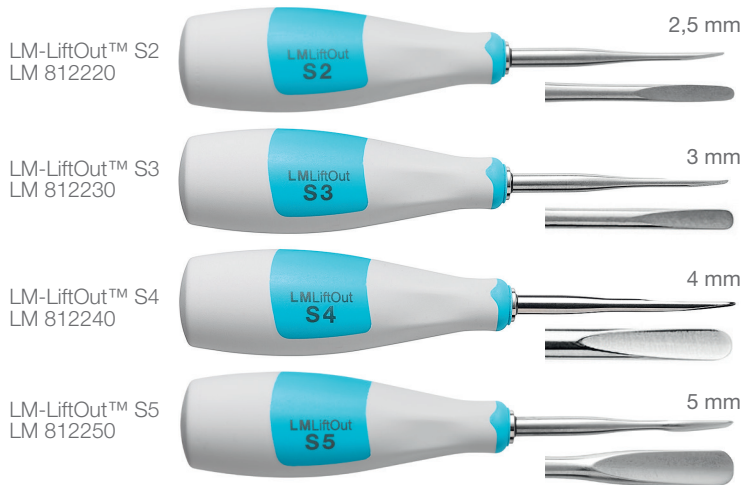

Gebogen

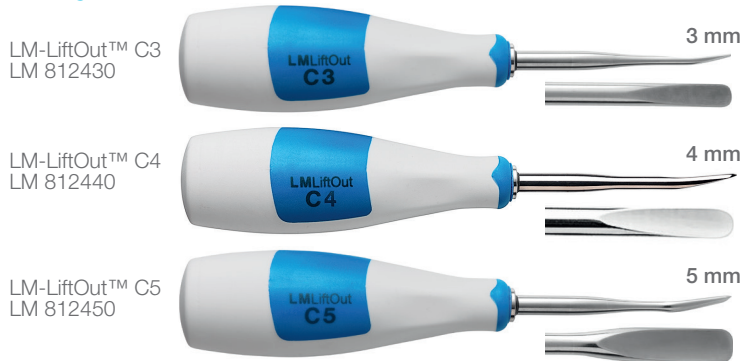

Zahnextraktion mit Vertrauen & atraumatische Luxation

Bewährte LM™ Ergonomie und taktile Sensitivität
jetzt auch bei Extraktionsinstrumenten

Merkmale	Vorteile
Ergonomisches Design	– liegt angenehm in der Hand und lässt sich gut bewegen
Sichere LM-ErgoTouch-Oberfläche	– leichter, rutschfester Griff
Optimal balanciert	– kontrollierter Griff
Geringes Gewicht	– bequemer für die Hände
Klare Farbkodierung	– leichte Identifikation
LM-DuraGradeMAX™-Superstahl	– solides und scharfes Spitzen
Festsitzende, dichte Verbindung zwischen Griff und Arbeitsteil	– hygienisch



LM-Extraktionsinstrumente zum Best Produkt 2014 gekürt.




Scannen Sie den QR-Code!

LM SlimLift™

Luxationsinstrumente für extrem schmale Bereiche

Das spezielle Design der LM-SlimLift™ Instrumente ermöglicht die Behandlung in Bereichen, die mit traditionellen Luxationsinstrumenten schwer zugänglich sind. Mit Hilfe dieser Instrumente kann die Zahnextraktion so atraumatisch wie möglich erfolgen. Das sichert eine zügige Wundheilung. Die äußerst feine Spitze des Instruments wird in den engen Parodontalspalt eingeführt. Das Instrument wird behutsam unter gleichzeitigen Hin- und Herbewegungen in Richtung der Wurzelspitze geführt. LM-SlimLift™ sollte nicht wie ein Hebel eingesetzt werden.

Die extrem dünne Spitze ermöglicht eine äußerst atraumatische Extraktion.

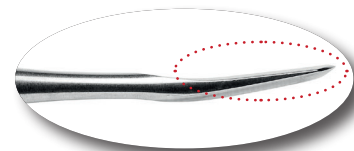

Dünne LM-SlimLift™ Instrumente – eine wirklich atraumatische Lösung

MD, DDS, D.Med.Sc, Oralchirurg Peter
Jungell, Helsinki, Finnland



„Gegenwärtig verwende ich die LM-SlimLift™-Instrumente für fast alle Extraktionen. Ich verwende auch noch meine älteren bevorzugten Luxationsinstrumente, während ich die traditionellen Instrumente mittlerweile weniger häufig einsetze.

Das dünne Luxationsinstrument von LM™ kann sogar in besonders enge Parodontalspalte eingeführt werden. Wenn breite Instrumente verwendet werden, wird die Luxationskraft über einen breiteren Bereich zu den Seiten und tiefer zur Wurzelspitze verteilt, sodass vor allem das Frakturrisiko der zerbrechlichen Wurzeln erheblich begrenzt wird. Die meisten Extraktionen können mit Luxationsinstrumenten durchgeführt werden, ohne dass weitere operative Maßnahmen erforderlich sind.

Aufgrund ihres Designs und Materials bieten die LM-SlimLift™-Instrumente einen hervorragenden Halt. Zunächst fühlen sich die

Griffe eventuell zu groß an, doch in der klinischen Praxis habe ich festgestellt, dass sie perfekt in der Hand liegen. Das Instrument kann entweder mit der Handfläche oder nur mit den Fingern gehalten werden. Das für den jeweiligen klinischen Bedarf geeignete Instrument lässt sich leicht aus der großen Auswahl verfügbarer Größen auswählen. Die breiten Klingen eignen sich für die Extraktion der Unterkiefermolaren, die schmalen Spitzen dagegen sind ideal für die Extraktion der schmalen Wurzeln der Oberkieferzähne.

Ich kann die LM-SlimLift™-Instrumente für alle Zahnärzte empfehlen: Es ist sinnvoll, auf die alten und schlecht funktionierenden Instrumente ganz zu verzichten. Zu oft hört man von Fällen, wo die Behandlung der Wurzel fast zwei Stunden gedauert hat.“

Winkel und Größen

Gerade

LM-SlimLift™ S3
LM 812630



3 mm

LM-SlimLift™ S4
LM 812640



4 mm

LM-SlimLift™ S5
LM 812650



5 mm

Gebogen

LM-SlimLift™ C3
LM 812830



3 mm

LM-SlimLift™ C4
LM 812840



4 mm

LM-SlimLift™ C5
LM 812850



5 mm

LMTwistOut™

LMTwistOut™

Hebel für kraftvolle Extraktion

LM-TwistOut™ Instrumente werden in Situationen verwendet, in denen kraftvolle Hebelbewegungen erforderlich sind.



„Dieser Wurzelheber von LM™ wurde speziell für Hebelanwendungen entworfen“

Bite Magazine, August 2014
von Dr. Davis Lakatos, Complete Dentistry,
Kilcoy, QLD, Australien

„Letztes Jahr bin ich auf dem Australian Dental Congress in Melbourne auf diesen Wurzelheber gestoßen. Da wir eine ländliche Praxis sind und wahrscheinlich ein paar mehr Zahnextraktionen durchführen als in einem Stadtgebiet, ist das Instrument sehr praktisch.

Luxationsinstrumente sind, wie ich finde, oftmals recht dünn, und wenn etwas zu viel Druck angewendet wird, verbiegen oder brechen sie leicht. Dieser Wurzelheber von LM™ wurde speziell für Hebelanwendungen entworfen.

Ich verwende diesen Wurzelheber für alle Zahnextraktionen und besitze das ganze Sortiment gerader und abgewinkelter Modelle in allen Größen. Es ist ein sehr robustes und einfaches Instrument, mit dem Zahnextraktionen viel leichter durchgeführt werden können.


Ich hatte mich oft gefragt, warum es nicht ein robusteres Luxationsinstrument auf dem Markt gibt, doch wie sich zeigt, ist dieser Wurzelheber genau das, wonach ich gesucht hatte.“

Winkel und Größen

Gerade



Gebogen

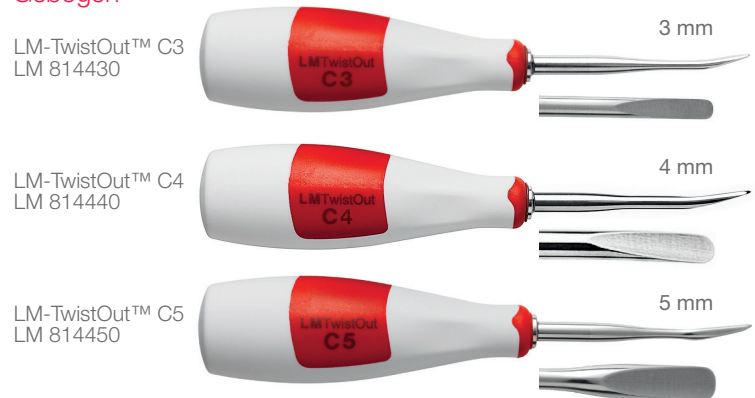

Pflegeleicht

Kassette LM 810001

Die LM™ Extraktionsinstrumente werden in einer praktischen Kassette geliefert, die sowohl das Instrument schützt als auch Verletzungen des Personals bei der Instrumentenpflege vermeidet. Die Kassette verhindert zudem, dass ein Instrument den Sterilisationsbeutel durchstechen kann. So wird Sterilität noch besser gewährleistet. Die Kassette kann mit Farbköpfen kodiert werden.

Schleifstein LM 818002

Die von Hand montierten Arbeitsspitzen aus LM-DuraGradeMAX™ Superstahl bleiben bei richtiger Anwendung und Pflege lange scharf. Schleifen Sie die Extraktionsinstrumente gelegentlich mit dem speziellen runden Schleifstein. Diese einfache und schnelle Vorgehensweise hält Ihre Instrumente in Topkondition und immer einsatzbereit.



Wurzelrestentferner

Root Tip Pick LM 769-771 XSI/ES

zum Entfernen von Wurzelspitzen

- eignet sich gut in allen schwer zugänglichen Bereichen
- mit LM-ErgoSense®- (ES) und LM-ErgoMax™-Griff (XSI) erhältlich



LM-RootOut™ LM 812210

speziell gestaltet zum sanften Lockern und Heben der Wurzelspitze

- nicht empfohlen zum Entfernen größerer Wurzelspitzen
- ähnlich wie Heidbrink Wurzelheber
- sicherer Griff durch ergonomisches Design

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finnland
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

